



外科製品

ディスプレイ  
メデイカルプロダクト

手術用カウント用具

# ガーゼカウント トレー



ガーゼが1枚しか入らない特殊ポケット構造により、  
カウントミスを低減します。

# オオサキガーゼカウントトレー




外科製品

メデイカルプロダクツ  
ディスプレイ

## 商品特長


### 1 カウントミスを防ぐ特殊ポケット構造

- ポケットは、ガーゼが1枚しか入らない構造になっているため、1枚ずつ確実にカウントすることができます。
- ポケットにガーゼを投入すると、内部が横に膨らみ、しっかりと収まるため、ガーゼが逆戻りしにくくなっています。
- それぞれのポケットが高い仕切りで区切られているため、ガーゼ1枚ずつの視認性が高く、カウントが容易です。

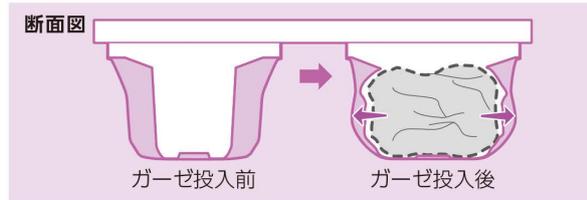

### 2 血液などが飛散しにくいポケット構造

- 特殊ポケット構造により、血液が4方向に逃げるため、投入時の圧力による血液飛散を抑え、医療従事者への感染リスクを低減します。

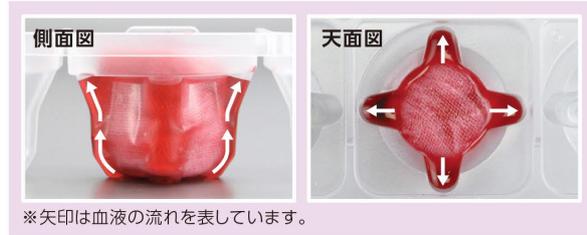


### 3 分割できて経済的

- ミシン目から切って半分に分割できるため、ガーゼの使用枚数に合わせて無駄なく使用できて経済的です。

### 4 測定しやすいトレー重量

- 出血量の測定時に計算しやすいよう、1トレー(20ポケット)が約20gとなっています。半分に分割した $\frac{1}{2}$ トレー(10ポケット)は約10gになります。

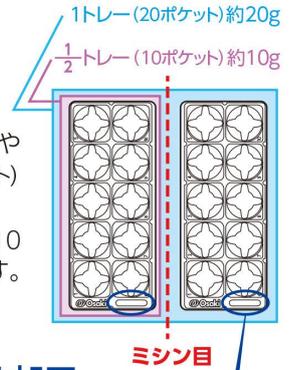

### 5 持ちやすい滑り止め加工

- 凹凸の滑り止め加工を施しているため、持ちやすくなっています。
- 片手でトレーの滑り止め部分を押さえながらガーゼを投入すると、安定します。



### 6 安定しやすい底面形状


- 底面が平らで接地面積が広いいため、ガーゼ投入時にトレーが安定し、積み上げても倒れにくくなっています。

## 商品情報


### ■素材

ポリプロピレン

### ■ガーゼの入れ方

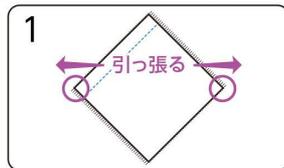

ガーゼ確認後、上図○部分を持ち、対角線に引っ張ります。

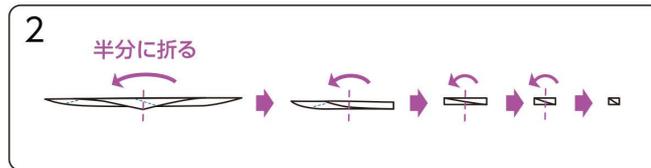

4回半分に折ってトレーに入れます。



ガーゼを奥までしっかり入れます。

⚠ 手術用ガーゼ30cm×30cm1ply以外は使用しないでください。

## 商品規格

### ■オオサキガーゼカウント トレー

品番	商品名・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード/ITFコード	
57135	オオサキガーゼカウント トレー 20 100枚入(50枚×2袋)	販売単位	450×280×280	2.7kg	4箱	4971032571355
		外装	586×595×475	11.9kg		—

◇ 商品はすべてオープン価格です。



オオサキメデイカル株式会社

本社 / 名古屋市中区玉池町203番地 〒452-0812 Tel.(052) 501-2221  
ホームページ / <http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail / [support@osakimedical.co.jp](mailto:support@osakimedical.co.jp)

※規格には誤差が生じる場合があります。

取扱店