


商品情報

■使用方法


レンズの取り付け方

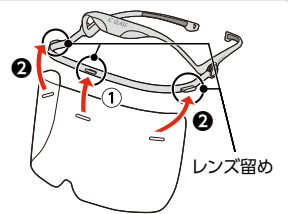

①フレーム中央の“レンズ留め”に、レンズ中央の穴をはめ込みます。
②フレーム左右の“レンズ留め”に、レンズ左右の穴をはめ込みます。

3ヶ所全てが、確実にフレームにはめ込まれていることを確認してください。

メガネと併用する場合

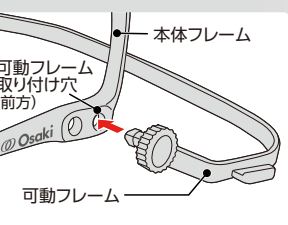

前方の“可動フレーム取り付け穴”に“可動フレーム”を取り付けることにより、目とレンズの距離を広げることができます。

■素材

ABS樹脂、合成ゴム
※ラテックスフリー（天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません）

商品規格

■ICグラス®レンズアップ

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード / ITFコード
57019	ICグラス®レンズアップ ブラック 1本入	販売単位 245 × 320 × 44	68.6g	36袋	4971032570198 14971032570195
		外装 549 × 318 × 504	3.3kg		
57020	ICグラス®レンズアップ ネイビー 1本入	販売単位 245 × 320 × 44	68.6g	36袋	4971032570204 14971032570201
		外装 549 × 318 × 504	3.3kg		
57021	ICグラス®レンズアップ ボルドー 1本入	販売単位 245 × 320 × 44	68.6g	36袋	4971032570211 14971032570218
		外装 549 × 318 × 504	3.3kg		
57022	ICグラス®レンズアップ グリーン 1本入	販売単位 245 × 320 × 44	68.6g	36袋	4971032570228 14971032570225
		外装 549 × 318 × 504	3.3kg		
57023	ICグラス®レンズアップ ライトグレー 1本入	販売単位 245 × 320 × 44	68.6g	36袋	4971032570235 14971032570232
		外装 549 × 318 × 504	3.3kg		

◇商品は全てオープン価格です。

⚠ ICグラス®レンズアップには、レンズが付属していません。別売のレンズが必要になります。

■ICグラス®レンズ レンズアップ用


品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード / ITFコード
57042	ICグラス®レンズ 汎用タイプ レンズアップ用 25cm×11.6cm 50枚入	販売単位 122 × 256 × 12	218.5g	6個 × 8箱	4971032570426 14971032570423
		内装 261 × 125 × 90	1.3kg		
		外装 389 × 279 × 283	11.3kg		
57044	ICグラス®レンズ FS汎用タイプ レンズアップ用 25cm×21cm 50枚入	販売単位 215 × 260 × 10	402.0g	12箱	4971032570440 14971032570447
		外装 279 × 149 × 242	5.0kg		
		内装 261 × 125 × 90	1.7kg		
57043	ICグラス®レンズ 光学タイプ レンズアップ用 25cm×11.6cm 50枚入	販売単位 122 × 256 × 12	234.0g	6個 × 8箱	4971032570433 14971032570430
		内装 261 × 125 × 90	1.7kg		
		外装 389 × 279 × 283	12.1kg		

◇商品は全てオープン価格です。

■製品仕様


フレーム(本品)

本体フレーム

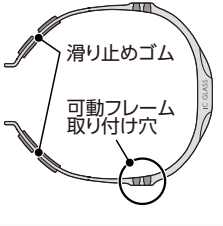


滑り止めゴム
可動フレーム
取り付け穴

可動フレーム

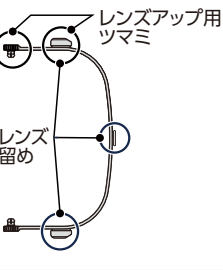

レンズアップ用
ツマミ
レンズ
留め

ICグラス®レンズ(別売)

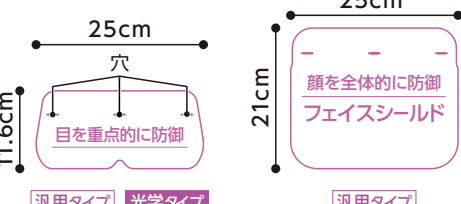

25cm
11.6cm
21cm

穴
目を重点的に防御
顔を全体的に防御
フェイスシールド

汎用タイプ 光学タイプ 汎用タイプ

外科製品

外科製品

PPE

PPE

飛沫感染防止アイウェア

ICグラス® レンズアップ
LENS-UP



レンズアップ
タイプ

メガネ
併用可

レンズ
交換式



飛沫感染防止アイウェア
ICグラス® レンズアップ
LENS-UP
DROPLET INFECTION PREVENTION EYEWEAR

目への血液・体液曝露による飛沫感染を防ぐ、
レンズの跳ね上げが可能なアイウェアです。



オオサキメディカル株式会社
名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812
<https://www.osakimedical.co.jp/>



オオサキメディカル
オフィシャルサイト

※規格には誤差が生じる場合があります。

取扱店

着脱不要なレンズアップフレームと高機能レンズが 感染対策時のストレスを軽減！

着脱不要な レンズアップタイプ

レンズが不要な時にフレームを着用したまま跳ね上げることができるので、着脱の手間とストレスを軽減します。また眼鏡との併用が可能です。

手早く、簡単レンズ交換

3箇所の”レンズ留め”に差し込むだけで、グローブをしたままでも手早く、簡単にレンズ交換ができます。

服装に合わせて選べる 洗練されたフレームカラー


ユニフォームとコーディネートがしやすい落ち着いた色合いで、部署や用途などに合わせてカラーを選ぶことができます。

長時間の使用でも快適

- 頭をやさしく包む形状による適度なホールド感で圧迫を和らげます。
- フレーム後端の滑り止めゴムによりズレにくく長時間快適に使用できます。

清潔にレンズアップ可能

レンズに指が直接触れることなく清潔にレンズアップできるツマミが、左右2箇所ずつあります。

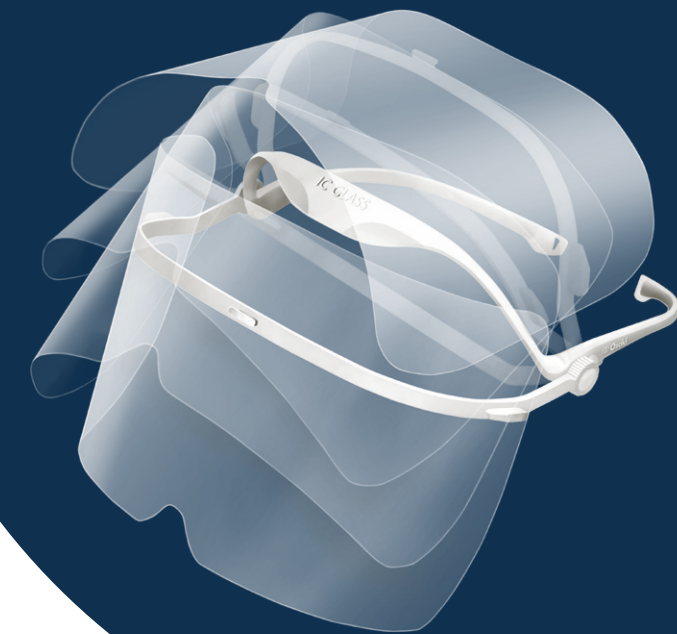

Coordinate & Color variation



ブラック
BLACK



ネイビー
NAVY



グリーン
GREEN



ボルドー
BORDEAUX



ライトグレー
LIGHT GRAY

経済性と使用シーンで選べるレンズ(別売)

種 類	汎用タイプ	FS汎用タイプ	光学タイプ
形 状			
	取り換えが簡単な3点留め		
防護範囲	目まわり	顔全体	目まわり
透 明 度	○	○	◎ 反射防止加工あり
防曇性	○	○	○
経 済 性	◎	○	△