

オオサキPPEホルダー設置方法

●設置場所に応じて、別売の“設置用品”を使用することで、簡単に取り付けができます。
 〈設置用品(別売)〉

設置用品	特長
<p>マグネット</p> <p> 標準磁カタイプ</p> <p>2個入(ボルト2個付)</p> <p> 強磁カタイプ</p> <p>2個入(ボルト2個付)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● マグネットにネジ穴が付いているため、簡単に装着でき、設置後にホルダーから外れにくくなっています。 ● 〈標準磁カタイプ〉 ● ホルダーを1個ずつ設置するのに適しています。 ● 〈強磁カタイプ〉 ● プレートと組み合わせて設置する際に適しています。 ● 磁力が強いため、幅広い場所に設置可能です。また、磁力不足によるホルダーの落下が起こりにくいです。 ● 裏面に保護シールが貼ってあるため、設置後のズレや壁の傷つきを押さえます。 <p>⚠ 設置対象物によって必要な磁力が異なるため、対象物に合わせて適切なマグネットを選んでください。</p> <p>⚠ マグネット同士を近づけないでください。また、マグネット単体を壁などに付けないでください。磁力が強力なため、ひび割れや離せなくなる恐れがあります。</p>
<p>壁付ネジ</p> <p></p> <p>4本入(アンカー4個付)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 石こうボードなどにも使用可能な、アンカー付き壁付ネジです。 ● ※“壁付ネジ”は4本入り(ネジ4本・アンカー4個)のため、本体2個分に使用できます。(本体1個に使用するネジは2本です。) ● ※設置の際は、取り扱い説明書と建物の構造を確認してから設置してください。
<p>スチールプレート</p> <p></p> <p>1枚入</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 壁にネジで固定して使用する、マグネットが付くスチールプレートです。 ● マグネットが付かない壁にもマグネットを装着したホルダーを設置することができます。簡単に取り外すことができます。 ● ※壁付ネジとセットで使用してください。
<p>フック</p> <p></p> <p>2個入</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● ホルダー専用のフックです。 ● 保護キャップが付いているため、安全性が高く対象物から抜けにくい構造となっています。また、設置後の位置がずれにくく、余計な高さを取りません。 ● ※直径1cmまでの対象物に掛けることができます。 <p>〈設置後の高さ比較例〉</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>ホルダー側面</p> <p>一般のフック</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ホルダー側面</p> <p>専用フック</p> </div> </div>
<p>プレート 3個用/5個用</p> <p></p> <p>1枚入(ボルト・ナット 3セット付/5セット付)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● PPEホルダーソフトを連結することができるプレートです。 ● 3個用と5個用があります。 ● プレートごと移動させることでホルダーを簡単に移動させることができます。 ● 重量が軽く、側面がスポンジ素材で柔らかいため、安全性に優れています。 ● ※ホルダー連結用のネジとボルトが同梱されています。(“プレート3個用”はネジ・ボルトが3セット、“プレート5個用”は5セット同梱) ● ※壁に設置する際は、別売のマグネット4個を使用してください。 <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>3個用</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>5個用</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  <p>付属ネジ・ボルト</p> </div>
<p>手すりアタッチメント</p> <p></p> <p>1個入</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● プレートに装着させることで手すりに設置が可能です。 ● スポンジ素材で様々な規格の手すりにフィットし、横にズレにくく外れにくいです。 ● ※手すりアタッチメント装着後の“プレート5個用”にはPPEホルダー本体が3個、“プレート3個用”にはPPEホルダーが1個、装着できます。 ● ※必ずプレートとセットで使用してください。 ● ※壁と手すりの隙間4.5cmまで対応しています。 <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>アタッチメント</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>装着後</p> </div> </div>

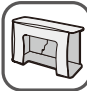
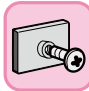
設置例

1 壁へ設置



設置例 1

壁へPPEホルダー1個を、マグネットで設置する場合
(袖なしエプロン)

- ① 各種ホルダー (例: ステンレス)  × 1
- ② マグネット 標準磁力タイプ 2個入 (ボルト2個付)  × 1

設置例 2

壁へ設置例1を、スチールプレートで設置する場合

※壁にマグネットが付かない場合

- ① スチールプレート1枚入  × 1
- ② 壁付ネジ 4本入 (アンカー4個付)  × 1

2 回診車/カートへ設置



設置例

回診車へPPEホルダー1個を、フックで設置する場合
(グローブ)




- ① 各種ホルダー (例: プラスチック)  × 1
- ② フック 2個入  × 1

3 手すりへ設置



設置例

手すりへPPEホルダー3個を設置する場合
(「袖付エプロン」「マスク」「グローブ」)

- ① 各種ホルダー (例: プラスチック)  × 3
- ② プレート5個用 1枚入 (ボルト・ナット 5セット付)  × 1
- ③ 手すりアタッチメント 1個入  × 1

※ 手すりアタッチメント装着後の「プレート5個用」にはPPEホルダー本体が3個、「プレート3個用」にはPPEホルダーが1個、装着できます。

PPEホルダーの組み立て動画はこちら!

組み立て方や設置方法などの、詳しい情報を見ることができます。

<https://www.osakimedical.co.jp/item/PPEholder/index.html>

