

一般医療機器

検査・検診用手袋



外科製品

PPE

ニトリルグローブI

ホワイト

ブルー



伸縮性が高くフィット感に富んだ
操作性の高いニトリル手袋です。



外科製品

PPE

商品特長

1 フィット感に富んだ伸縮性

- 伸縮性に富んでいるため、手にぴったりフィットします。

2 ラテックスフリー

- 材料にラテックスを使用していないため、ラテックスアレルギーの方にも安心して使用していただけます。

3 作業性に優れた滑り止め加工

- 指先に滑り止め加工を施しているため、作業性に優れています。

4 食品衛生法適合(厚生省告示第370号)

- 食品衛生法に適合しているため、食品加工にも使用可能です。

5 カラーバリエーション

- ホワイトとブルーの2色から選べるため、用途や使用部署によって使い分けすることができます。


6 サイズを識別しやすいパッケージ

- ひと目でサイズを識別できるよう、パッケージを色分けしています。

商品情報

■着脱方法

着け方

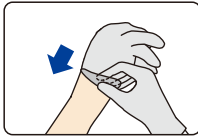


手を入れ、袖口の部分をつかんで装着します。

外し方



1 片方の手袋の袖口(外側)をつかみます。

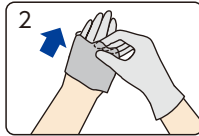

2 手袋を裏返すように外します。



3 手袋を着けている手で外した手袋をにぎり、反対側の手を手袋の袖口に差し込みます。




4 汚染部に触れないよう、手袋を裏返すように外し、先に外した手袋を包み込みます。



5 外した手袋は2枚がひとつかたまりになった状態ですぐに廃棄してください。

■サイズガイド

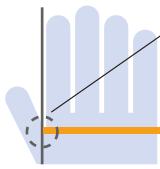

1. 人差し指の付け根を合わせます。

2. 手の甲の右端が破線縦ラインと合ったサイズが目安になります。

SS S M L

■バリエーション

種類	サイズ(手のひらの幅×全長)
SS	7.5cm×24cm
S	8.5cm×24cm
M	9.5cm×24cm
L	10.5cm×24cm

手のひらの幅

全長

■素材

合成ゴム(ニトリルゴム)

※ラテックスフリー(天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません)

商品規格

一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋:70976000

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))		重量	梱入数	JANコード / ITFコード
		販売単位	外装			
70123	オオサキ ニトリルグローブI SS ホワイト 200枚入 手のひらの幅7.5cm×24cm	販売単位	240 × 75 × 125	600.0g	10箱	4971032701233 14971032701230
		外装	395 × 260 × 265	6.5kg		
70124	オオサキ ニトリルグローブI S ホワイト 200枚入 手のひらの幅8.5cm×24cm	販売単位	240 × 75 × 125	660.0g	10箱	4971032701240 14971032701247
		外装	395 × 260 × 265	7.1kg		
70125	オオサキ ニトリルグローブI M ホワイト 200枚入 手のひらの幅9.5cm×24cm	販売単位	240 × 75 × 125	760.0g	10箱	4971032701257 14971032701254
		外装	395 × 260 × 265	8.1kg		
70126	オオサキ ニトリルグローブI L ホワイト 200枚入 手のひらの幅10.5cm×24cm	販売単位	240 × 75 × 125	860.0g	10箱	4971032701264 14971032701261
		外装	395 × 260 × 265	9.1kg		
70127	オオサキ ニトリルグローブI SS ブルー 200枚入 手のひらの幅7.5cm×24cm	販売単位	240 × 75 × 125	600.0g	10箱	4971032701271 14971032701278
		外装	395 × 260 × 265	6.5kg		
70128	オオサキ ニトリルグローブI S ブルー 200枚入 手のひらの幅8.5cm×24cm	販売単位	240 × 75 × 125	660.0g	10箱	4971032701288 14971032701285
		外装	395 × 260 × 265	7.1kg		
70129	オオサキ ニトリルグローブI M ブルー 200枚入 手のひらの幅9.5cm×24cm	販売単位	240 × 75 × 125	760.0g	10箱	4971032701295 14971032701292
		外装	395 × 260 × 265	8.1kg		
70130	オオサキ ニトリルグローブI L ブルー 200枚入 手のひらの幅10.5cm×24cm	販売単位	240 × 75 × 125	860.0g	10箱	4971032701301 14971032701308
		外装	395 × 260 × 265	9.1kg		

■販売名:オオサキニトリルグローブN1 ■届出番号:23B2X10001000100 ■製造国:中国

◇商品は全てオープン価格です。

Osaki
オオサキメディカル株式会社
名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812
<https://www.osakimedical.co.jp/>



オオサキメディカル
ウェブサイト

取扱店

■添付文書が必要な方は弊社まで請求してください。
※規格には誤差が生じる場合があります。