



外科製品

PPE

処置・検査用マスク

# プロフェッショナルマスクI オメガ



LEVEL 1 適合

医療用マスク 米国標準規格ASTM F2100-11

鼻や口を圧迫せず、呼吸がしやすい  
オメガ形状プリーツのマスクです。



外科製品

PPE

## 商品特長

### 1 呼吸しやすいオメガ形状プリーツ


- オメガ形状のプリーツが大きく広がり、鼻や口を圧迫することなく、呼吸しやすくなっています。
- 広がったプリーツが、口まわりまでしっかり覆います。

### 2 しっかりフィット

- フィット性の高いノーズピースを使用しているため、メガネやゴーグルが曇りにくくなっています。
- フィット性が高く、感染・風邪・花粉対策にも適しています。

### 3 やさしい肌ざわり

- やわらかい不織布で、やさしい肌ざわりです。
- マスクの両サイドを不織布で覆い、シール処理しているため、肌に触れても痛くありません。

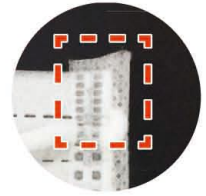

### 4 耳が痛くなりにくい

- ゴム紐は、耳が痛くなりやすい楕円形ゴムです。

## 商品情報

### ■マスク試験データ

試験項目	プロフェッショナルマスクI オメガ 実測値*	ASTM F2100-11 規格値 レベル1
BFE(細菌濾過効率)	≥99%	≥95%
ΔP(呼吸抵抗)	4.0mmH <sub>2</sub> O/cm <sup>2</sup>	<4.0mmH <sub>2</sub> O/cm <sup>2</sup>
PFE(微粒子濾過効率)	≥99%	≥95%
人工血液不浸透性	80mmHg	80mmHg
可燃性	CLASS1	CLASS1

### ■推奨使用シーン

使用部署	レベル1
病棟(汎用時)	●
病棟(処置時)	▲
外来	●
検査室	●
救急科・ICU	—
手術室	—

医療用マスクの材質の米国標準規格「ASTM F2100-11 レベル1」に適合したマスクです。

<試験実施日>  
一般財団法人 カケンテストセンター  
2016年9月13日  
※実測値であり、保証値ではありません。

### ■バリエーション

種類	カラー	サイズ
小さめ	ピンク	9cm×15cm
フリー	ブルー	9cm×17cm
	ホワイト	

### ■素材

本体：ポリプロピレン ノーズピース：鉄  
ゴム紐：ポリエステル、ポリウレタン  
※ラテックスフリー  
(天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません。)

⚠MRI検査時は使用しないでください。ノーズピースは鉄製のため、磁力でマスクが引き寄せられる恐れがあります。

### ■着脱方法

着け方



ノーズピースを上にして、ゴム紐が外側になるように装着します。  
※ピンク・ブルーは、色面が外側になります。



耳にゴム紐を掛け、ノーズピースを鼻の形に合わせます。



ノーズピースを押さえたままプリーツを広げます。

外し方



マスク外面を触らないようにゴム紐をもって取り外します。

## 商品規格

### ■プロフェッショナルマスクI オメガ

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード/ITFコード
51420	プロフェッショナルマスクI オメガ ゴム紐 フリー ホワイト 50枚入 9cm×17cm	販売単位   180 × 98 × 100	177.0g	40箱	4971032514208
		外装   520 × 430 × 380	7.9kg		
51421	プロフェッショナルマスクI オメガ ゴム紐 フリー ブルー 50枚入 9cm×17cm	販売単位   180 × 98 × 100	177.0g	40箱	4971032514215
		外装   520 × 430 × 380	7.9kg		
51419	プロフェッショナルマスクI オメガ ゴム紐 小さめ ピンク 50枚入 9cm×15cm	販売単位   180 × 98 × 100	160.0g	40箱	4971032514192
		外装   520 × 430 × 380	7.3kg		

◇商品はすべてオープン価格です。



オオサキメディカル株式会社

本社 / 名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812 Tel.(052)501-2221  
ホームページ / <http://www.osakimedical.co.jp/> E-mail / [support@osakimedical.co.jp](mailto:support@osakimedical.co.jp)

※規格には誤差が生じる場合があります。

取扱店