



外科製品

PPE

医療用マスク

プロフェッショナル マスクI



ホワイト

ブルー

バリア性に優れた、肌触りの良い
サージカルマスクです。



外科製品

PPE

商品特長

1 優れたバリア性

- バリア性に優れたフィルタを使用しており、病棟や外来、検査室など、幅広く使用できます。

2 しっかりフィット

- ゴム紐がマスク外面から出ているため、頬に隙間ができてくなくなっています。
- フィット性の高いノーズフィッターを使用しているため、メガネやゴーグルが曇りにくくなっています。

3 やさしい肌触り

- 柔らかい不織布を使用しているため、ソフトな肌触りです。

4 耳が痛くなりにくい

- ゴム紐は、長時間の着用でも耳が痛くなりやすい平ゴムです。

商品情報

JIS T9001適合審査合格品

日本産業規格 JIS T 9001						
医療用マスククラスI 規格適合番号 M12109046						
適合番号発行元: JHPIA						
試験項目	PFE	BFE	VFE	可燃性	血液バリア	安全衛生
規格値	≥95%	≥95%	≥95%	(区分1)	10.6kPa	・通気性
適合判定	○	○	○	○	○	○

PFE: 微小粒子捕集効率

BFE: バクテリア飛まつ捕集効率

VFE: ウイルス飛まつ捕集効率

■着脱方法

着け方



ノーズフィッターを上にして、ヒダが下向きになるように装着します。ゴム紐の付け位置は外面です(ピンク・ブルーは、色面が外側になります)。ロゴ表示は着用者の左下です。



耳にゴム紐を掛け、ノーズフィッターを鼻の形に合わせます。

■推奨使用シーン

使用部署	クラスI	クラスII	クラスIII
病棟	●	●*1	—
外来	●	●	—
検査室*2	●	●	●
救急科・ICU	—	●*3	●
手術室	—	—	●

*1: 口腔ケア・おむつ交換時など、飛散しやすい処置時

*2: MRI検査時を除く

*3: 小さな創傷、治りかけの創傷、極少量の血液飛散が想定される場合

外し方



ノーズフィッターを押さえたままブリーツを広げます。



マスク外面を触らないようにゴム紐をもって取り外します。

■バリエーション

種類	カラー	サイズ
小さめ	ホワイト	9cm×14.5cm
フリー	ブルー	9.5cm×17.5cm

⚠ MRI検査時は使用しないでください。ノーズフィッターが鉄素材のため、磁力でマスクが引き寄せられる恐れがあります。

商品規格

商品写真	品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	POSレジ登録用名称/JANコード	JANコード/ITFコード
	51408	プロフェッショナルマスクI ゴム紐 フリー ブルー 50枚入 9.5cm×17.5cm	販売単位 180 × 90 × 100 --- 外装 520 × 380 × 380	190.0g --- 8.6kg	40箱	プロマスク フリー 4 971032 514086	4971032514086 --- 14971032514083
	51409	プロフェッショナルマスクI ゴム紐 フリー ホワイト 50枚入 9.5cm×17.5cm	販売単位 180 × 90 × 100 --- 外装 520 × 380 × 380	190.0g --- 8.6kg	40箱	プロマスク ホワイト 4 971032 514093	4971032514093 --- 14971032514090
	51411	プロフェッショナルマスクI ゴム紐 小さめ ホワイト 50枚入 9cm×14.5cm	販売単位 180 × 90 × 100 --- 外装 520 × 380 × 380	165.0g --- 7.6kg	40箱	プロマスク ホワイトS 4 971032 514116	4971032514116 --- 14971032514113

■素材: [本体・フィルタ] ポリプロピレン [ノーズフィッター] 鉄、ポリエチレン [目紐] ポリエステル、ポリウレタン
※ラテックスフリー(天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません)

◇商品は全てオープン価格です。

Osaki
オオサキメディカル株式会社
名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812
<https://www.osakimedical.co.jp/>



オオサキメディカル
オフィシャルサイト

取扱店

※規格には誤差が生じる場合があります。