

医04 整形用品

一般医療機器 X線造影材入りスポンジ 13705000

## 縫製ガーゼX-KS

### 再使用禁止

---

#### 【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・X線造影糸部分を直接挟んで使用しないこと。  
[切断又は抜け落ちて体内遺残するおそれがあるため。]
- ・X線造影糸に電気メス等を近付けないこと。  
[切断又は引火するおそれがあるため。]

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者  
オオサキメディカル株式会社  
お問い合わせ先 Tel 0120-15-0039

#### 【形状・構造及び原理等】

- ・医療ガーゼとX線造影材入りガーゼを積層して縫製した製品です。
- ・ガーゼの材質: 綿100%
- ・X線造影材(黒線)の材質: (固定材)ポリスチレン系熱可塑性  
エラストマー  
(造影剤)硫酸バリウム  
(着色剤)カーボンブラック
- ・縫製糸の材質: 綿100%
- ・柄付きは綿100%の紐を付けた製品です。

#### 【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする、X線で検知可能な成分を含有する器具をいう。

#### 【使用方法等】

- ・適宜滅菌して使用すること。
- ・滅菌は、高圧蒸気滅菌、E.O.G.滅菌ができる。

#### 【使用上の注意】

##### 重要な基本的注意

- ・体内へ留置しないこと。
- ・開封後は早めに使用すること。
- ・滅菌して使用する場合は、再滅菌しないこと。
- ・X線撮影において撮影体位や角度により陰影が不明瞭な場合がある。

#### 【保管方法及び有効期間等】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。