

医04 整形用品

一般医療機器 単回使用クラスI処置キット 33961001

滅菌オオサキ処置キットI

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・再滅菌禁止

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
オオサキメディカル株式会社
お問い合わせ先 Tel 0120-15-0039

【形状・構造及び原理等】

- ・一般的な処置(消毒、止血、清拭等)を行うために必要な各種の一般医療機器と衛生用品等を組合わせた滅菌キットです。
- ・本キットは、下表『構成品の種類、名称、規格等』に示す構成品のうち、2品目以上を組合わけています。

表) 構成品の種類、名称、規格等

種 類	構成品名称・規格等
ガーゼ類	ガーゼ、不織布ガーゼ、 サージカルパッド(サイズ各種)
脱脂綿類	脱脂綿、カットメン
吸収パッド	お産用パッド、紙おむつ(サイズ各種)
そ の 他	ショーツ、T字帯 等

※組合わせにより、同梱されない製品があります。

【使用目的又は効果】

一般的な処置を行うために必要なクラスIの各種器具、被覆保護材及び医薬品の全てを含む、プレパッケージされたキットをいう。本品は単回使用である。

【使用方法等】

- ・滅菌包材から取り出し、不潔にならないように注意しながら、ショーツもしくはT字帯等でガーゼ、脱脂綿、吸収パッドを固定し使用する。
- ・各構成品は、その使用用途から逸脱しない範囲で使用する。

【使用上の注意】

- 1.使用注意(次の患者には慎重に適用すること。)
 - 1) 構成品にガーゼやサージカルパッド、脱脂綿類が含まれる場合
 - ・ガーゼやサージカルパッド、脱脂綿類が濡れ、又は汚れたときは、適切に交換すること。
 - ・交換時には無理に剥がさないこと。
- 2.重要な基本的注意
 - ・体内へ留置しないこと。
 - ・開封後は速やかに使用すること。
 - ・使用後は感染防止に配慮して安全な方法で廃棄すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 1.保管方法
直射日光及び火気をさけ、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。
- 2.有効期間
容器又は被包の「使用期限」に表示【自己認証(当社データ)による】。