

器12 理学診療用器具

一般医療機器 止血用押圧器具 70617000

滅菌オオサキ止血用圧迫綿

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・再滅菌禁止

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

オオサキメディカル株式会社

お問い合わせ先 Tel 0120-15-0039

【形状・構造及び原理等】

ポリプロピレン・ポリエチレン複合繊維又はパルプを円筒状に加工し、滅菌した製品です。

【使用目的又は効果】

血管造影、その他の診断処置終了時に、大腿部又は前腕(橈骨動脈)部のカテーテル挿入部位を圧迫止血するために用いる器具をいう。

【使用方法等】

- ・使用用途に合わせて適切なサイズを選択すること。
- ・止血部分に圧迫止血できる程度に押さえて、テープや包帯で固定する。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ・使用前に形状を変更・加工してから使用しないこと。
- ・開封後は速やかに使用すること。
- ・体内に使用しないこと。
- ・使用中は止血の状態を適宜確認し、圧迫の程度を調節すること。  
[患者の状態及び圧迫の程度によって、動脈閉塞、皮下血腫、出血、腫脹、疼痛、痺れ等の症状を有する恐れがあるため。]

【保管方法及び有効期間等】

- 1.保管方法  
直射日光及び火気をさけ、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。
- 2.有効期間  
容器又は被包の「使用期限」に表示【自己認証(当社データ)による】。