

一般医療機器 単回使用クラスI処置キット 33961001

## 滅菌オオサキOBリネンセット I

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
  - ・再滅菌禁止
- < X線造影糸入ガーゼ、X線造影糸入縫製ガーゼ >
- ・ X線造影糸部分を直接挟んで使用しないこと。  
[切断又は抜け落ちて体内遺残するおそれがあるため。]
  - ・ X線造影糸に電気メス等を近付けないこと。  
[切断又は引火するおそれがあるため。]

#### 【形状・構造及び原理等】

- ・一般的な処置(消毒、止血、清拭等)を行うために必要な各種の一般医療機器と衛生用品等を組合わせた滅菌キットです。
- ・本キットは、下表『構成品の種類、名称、規格等』に示す構成品のうち、2品目以上を組合わけています。

表) 構成品の種類、名称、規格等

種 類	構成品名称・規格等
ガーゼ類	ガーゼ、X線造影糸入ガーゼ、X線造影糸入縫製ガーゼ、不織布ガーゼ、サージカルパッド(サイズ各種)
脱脂綿類	脱脂綿、カットメン、綿球、綿棒、(サイズ各種)
セッシ等	プラスチック製(サイズ各種)
シート・マット類	不織布製(サイズ各種)
ドレープ	吸水防水タイプ、撥水タイプ、パウチ付タイプ(サイズ各種)
脚 袋	不織布製(サイズ各種)
トレイ・カップ類	胎盤受、膿盆、水入れカップ 等
児 受 け	ガーゼ製、不織布製(サイズ各種)
ガ ウ ン	不織布製(サイズ各種)
マ ス ク	不織布製(サイズ各種)
キャップ	不織布製(サイズ各種)
直後パッド	直後パッド(サイズ各種)
お産用パッド	お産用パッド(サイズ各種)
タオル・ハンカチ類	タオル、ガーゼハンカチ(サイズ各種)
そ の 他	T字帯、ネームバンド、汚物処理袋、外科用綿テープ 等

※組合わせにより、同梱されない製品があります。

#### 【使用目的又は効果】

一般的な処置を行うために必要なクラスIの各種器具、被覆保護材及び医薬品の全てを含む、プレパッケージされたキットをいう。本品は単回使用である。

#### 【使用方法等】

- ・滅菌容器から取り出し、不潔にならないように注意しながら使用する。
- ・各構成品は、その使用用途から逸脱しない範囲で使用する

#### ≪使用方法等に関連する使用上の注意≫

- ・開封後は速やかに使用すること。
  - ・体内へ留置しないこと。
  - ・小児の手の届かない所に保管すること。
  - ・破損する可能性があるため、構成品に衝撃を与えないこと。
  - ・使用後は感染防止に配慮して安全な方法で廃棄すること。
  - ・開封した残品は使用しないこと。
- 構成品にセッシ等が含まれる場合
- ・外科開口部や創傷部位に接触させないこと。
  - ・無理に折り曲げたり、開いたりしないこと。
  - ・高温の物は挟まないこと。
  - ・重い物や滑りやすい物には使用しないこと。

#### 【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法  
直射日光及び火気をさけ、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。
2. 有効期間  
容器又は被包の「使用期限」に表示【自己認証(当社データ)による】。

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者  
オオサキメディカル株式会社  
お問い合わせ先 Tel 0120-15-0039