

医04 整形用品

一般医療機器 X線造影材入りガーゼ 32374000

OPガーゼX-A

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・X線造影糸部分を直接挟んで使用しないこと。
[切断又は抜け落ちて体内遺残するおそれがあるため。]
- ・X線造影糸に電気メス等を近づけないこと。
[切断又は引火するおそれがあるため。]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
オオサキメディカル株式会社
お問い合わせ先 Tel 0120-15-0039

【形状・構造及び原理等】

- ・X線造影材を入れたガーゼ製品です。
- ・ガーゼの材質:綿100%
X線造影材(青線)の材質:(固定材)ポリプロピレン、ポリエステル
(造影剤)硫酸バリウム
(着色剤)深海青グレード02

【使用目的又は効果】

- ・出血の抑制、液の吸収、又は擦過傷、乾燥、汚染からの器官の保護を目的として、身体内部又は外科切開部に用いる綿又はセルロース製の薬品を含まない吸収材料をいう。
- ・X線を検知できる成分を用いている。

【使用方法等】

- ・適宜滅菌して使用すること。
- ・創傷面には、滅菌して使用すること。
- ・滅菌は、高圧蒸気滅菌、E.O.G.滅菌ができる。

【使用上の注意】

- ・体内へ留置しないこと。
- ・開封後は早めに使用すること。
- ・滅菌して使用する場合は、再滅菌しないこと。
- ・X線撮影において撮影体位や角度により陰影が不明瞭な場合がある。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光及び火気をさけ、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。