

医04 整形用品

一般医療機器 X線造影材入りスポンジ 13705000

滅菌オオサキX線造影材入りスポンジX-KS

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・再滅菌禁止
- ・分割、裁断等の加工禁止
- ・乾燥状態での使用禁止
- ・本品を使用中に患者の容態が悪化した場合は、直ちに本品の使用を中止し、適切な処置を行うこと。
- ・X線造影糸部分を直接挟んで使用しないこと。
[切断又は抜け落ちて体内遺残するおそれがあるため。]
- ・X線造影糸に電気メス等を近付けないこと。
[切断又は引火するおそれがあるため。]

【形状・構造及び原理等】

- ・本品はウレタンスポンジをX線造影糸の入った医療ガーゼで覆い、綿紐を取り付けたものを滅菌した製品です。
- ・ウレタンスポンジの材質：軟質ウレタンフォーム100%
ガーゼの材質：綿100%
X線造影材の材質：(固定材)ポリスチレン
(造影剤)硫酸バリウム
(着色剤)カーボンブラック
縫紐の材質：綿100%

【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする、X線で検知可能な成分を含有する器具をいう。

【使用方法等】

1. 無菌的に滅菌袋を開封し、滅菌ラップに包まれた本品を取り出す。清潔野で滅菌ラップを展開し、本品を取り出す。
2. 本品に滅菌済み生理食塩水を含ませ、適当な湿潤状態となるように軽くしぼる。
3. 開腹術などにおいて術野の確保のため、目的外臓器の圧排に適宜使用する。
4. 使用後は本品を確実に取り出し、遺残防止のためX線撮影により、体内に本品が残されていないことを確認し、閉腹する。

【使用上の注意】

1. 使用注意
 - ・必ず滅菌済み生理食塩水を含ませた状態で使用すること。
 - ・保管状況や経時変化によりウレタンスポンジ部の一部又は全体が黄変色することがある。これはウレタンスポンジの性質によるものであり使用上問題はない。
 - ・紫外線に当てるとウレタンスポンジが黄変色するため、避けること。
 - ・本品を鉗子などで強く挟んだり、引っ張ったりすると、破損することがあるため注意すること。破損した場合は、速やかに回収し、新しいものと交換すること。
2. 重要な基本的注意
 - ・体内に留置しないこと。
 - ・開封後は速やかに使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
直射日光及び火気をさけ、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。
2. 有効期間
容器又は被包の「使用期限」に表示【自己認証(当社データ)による】。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
オオサキメディカル株式会社
お問い合わせ先 Tel 0120-15-0039