

医04 整形用品

一般医療機器 医療脱脂綿 70975000

オオサキ医療脱脂綿

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

オオサキメディカル株式会社

お問い合わせ先 Tel 0120-15-0039

【形状・構造及び原理等】

綿100%の脱脂綿製品です。

【使用目的又は効果】

医薬品を塗布したり、患者の体表から少量の体液を吸収したりする等、医療目的に使用するパッド状の綿繊維から成る材料をいう。

【使用方法等】

- ・適宜滅菌して使用すること。
- ・創傷面には、滅菌して使用すること。
- ・滅菌は、高圧蒸気滅菌、E.O.G.滅菌ができる。

【使用上の注意】

- ・体内へ留置しないこと。
- ・包装が開封、破損及び汚損している場合は使用しないこと。
- ・開封後は早めに使用すること。
- ・滅菌して使用する場合は、再滅菌しないこと。
- ・綿の表面や内部に黄色又は黒色の斑点状のものがみつかることがあるが、綿の実殻であるため使用上に支障はない。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。