

医04 整形用品

一般医療機器	手術用被覆・保護材	34654000
	熱傷被覆・保護材	11322101
	医療用不織布	34655000

## 滅菌オオサキサンドガーゼC

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・再滅菌禁止

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

オオサキメディカル株式会社

お問い合わせ先 Tel 0120-15-0039

#### 【形状・構造及び原理等】

本品は術後創傷、熱傷皮膚、創傷等の被覆・保護のために患部に貼って使用する多層構造のシート材で、滲出液等の漏出を防止する防水材、吸収性能を有する吸収材、創傷接触面である表面材の三層からなる滅菌製品です。

#### 【使用目的又は効果】

術後創傷のために用いる適切なサイズの被覆・保護材をいう。  
また熱傷皮膚を被覆及び保護し、熱傷部位の滲出液を吸収するために用いる幅広の層状ガーゼパッドをいう。また、創傷又は外科切開部を処置するために用いる不織布から成る被覆・保護材をいう。

#### 【使用方法等】

患部の大きさに応じ、適当な大きさのものを選択し使用すること。

#### 【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ・患部に感染症状(発疹、発赤、かゆみ、はれ、痛み、発熱)が認められる場合は使用しないこと。
- ・本品使用中に、皮膚障害や創感染と思われる症状があらわれた場合には、使用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること。
- ・患部の観察を十分に行い、滲出液の量や患部の状態に応じ、適切な交換及び処置を行うこと。
- ・交換時には無理にはがさないこと。
- ・体内に留置しないこと。
- ・開封後は速やかに使用すること。

#### 【保管方法及び有効期間等】

##### 1. 保管方法

直射日光及び火気をさけ、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

##### 2. 有効期間

容器又は被包の「使用期限」に表示【自己認証(当社データ)による】。