

医04 整形用品

一般医療機器 医療ガーゼ 13700000

## オオサキ医療ガーゼ30

### 再使用禁止

---

**【禁忌・禁止】**

再使用禁止

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者

オオサキメディカル株式会社

お問い合わせ先 Tel 0120-15-0039

**【形状・構造及び原理等】**

綿100%のガーゼ製品です。

**【使用目的又は効果】**

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする主としてガーゼから成る器具をいう。

**【使用方法等】**

- ・適宜滅菌して使用すること。
- ・創傷面には、滅菌して使用すること。
- ・滅菌は、高圧蒸気滅菌、E.O.G.滅菌ができる。

**【使用上の注意】**

- ・体内へ留置しないこと。
- ・開封後は早めに使用すること。
- ・滅菌して使用する場合は、再滅菌しないこと。

**【保管方法及び有効期間等】**

直射日光及び火気をさけ、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。