

医04 整形用品

一般医療機器 綿状創傷被覆・保護材 11751000

コットンパッド

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者
オオサキメディカル株式会社
お問い合わせ先 Tel 0120-15-0039

【形状・構造及び原理等】

- ・脱脂綿等をガーゼで包んだパッド状の製品です。
- ・ガーゼの材質:綿100%
- 脱脂綿の材質:綿100%

【使用目的又は効果】

創傷を被覆するために用いる、柔らかくふわふわした綿状の塊から成るパッドをいう。

【使用方法等】

- ・患部の大きさに応じ、適当な大きさのものを選択し使用すること。
- ・適宜滅菌して使用すること。
- ・滅菌は、高圧蒸気滅菌、E.O.G.滅菌ができる。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ・体内へ留置しないこと。
- ・開封後は早めに使用すること。
- ・滅菌して使用する場合は、再滅菌しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光及び火気をさけ、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。