

医04 整形用品

一般医療機器 X線造影材入りスポンジ 13705000

パール綿球X-A

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・X線造影糸部分を直接挟んで使用しないこと。
[切断又は抜け落ちて体内遺残するおそれがあるため。]
- ・X線造影糸に電気メス等を近付けないこと。
[切れたり発火するおそれがあるため。]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
オオサキメディカル株式会社
お問い合わせ先 Tel 0120-15-0039

【形状・構造及び原理等】

- ・綿100%の脱脂綿を球状にして、フィブリル化セルロースを噴霧した後、X線造影材を入れた製品です。
- ・X線造影材(青線)の材質:(固定材)ポリプロピレン、ポリエステル
(造影剤)硫酸バリウム
(着色剤)深海青グレード02
- ・紐付きは綿100%の糸を付けた製品です。
- ・医療ガーゼで覆ったものもあります。

【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする、X線で検知可能な成分を含有する器具をいう。

【使用方法等】

- ・適宜滅菌して使用すること。
- ・創傷面には、滅菌して使用すること。
- ・滅菌は、高圧蒸気滅菌、E.O.G.滅菌ができる。

【使用上の注意】

- ・体内へ留置しないこと。
- ・開封後は早めに使用すること。
- ・滅菌して使用する場合は、再滅菌しないこと。
- ・X線撮影において撮影体位や角度により陰影が不明瞭な場合がある。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。