

医04 整形用品

一般医療機器 単回使用汎用サージカルドレープ 35531000

## 滅菌オオサキパウチ付ドレープF

### 再使用禁止

---

#### 【警告】

消毒用アルコール等の可燃性消毒薬を使用した場合は、必ず乾燥していることを確認してから使用すること。  
[電気メス等を使用する際、気化した成分に引火することがあるため。]

#### 【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・再滅菌禁止

#### 【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法  
直射日光及び火気をさけ、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。
2. 使用期限  
容器又は被包に表示【自己認証(当社データ)による】。

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者  
オオサキメディカル株式会社  
お問い合わせ先 Tel 0120-15-0039

#### 【形状・構造及び原理等】

吸水・防水性の不織布製シートにパウチと粘着テープが付いた滅菌済み手術用ドレープ製品です。

#### 【使用目的又は効果】

- ・手術室やカテーテル処置室の汚染(器具やテーブルの上)から外科切開部位や術野を隔離するために、保護的なカバー又は障壁として用いる不織布製の用具をいう。
- ・本品は患者を手術中の熱、炎又は他の形態のエネルギーから保護するためにも使用する。
- ・本品は単回使用である。

#### 【使用方法等】

適宜使用すること。

#### 【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ・内視鏡や開創器などで光源を使用する場合は、光源の先端部をドレープの上に直接置かないこと。また、電気メスやレーザーの先端部をドレープの上に直接置かないこと。  
[熱によりドレープが焦げて患者の身体に熱傷が発生することがあるため。]
- ・電気メスをパウチのワイヤー部分に接触させないこと。  
[電気メスがショートし、患者が感電、怪我をする恐れがあるため。]
- ・本品の使用により、かぶれなどの皮膚障害が生じた場合、アレルギー症状を起こした場合には、ただちに本品の使用を中止し、適切な処置をすること。
- ・粘着テープを患者から除去する際は、粘着部を180°折り返すような方向へゆっくりとした速度で剥がし、除去すること。  
[皮膚が引っ張られ、皮膚剥離を起こすことがあるため。]
- ・外科開口部や創傷部位に接触させないこと。
- ・パウチ内に貯留した血液、滲出液等を外科開口部等に逆流させないこと。
- ・パウチ内に鋼製小物などの重量物を入れないこと。
- ・粘着テープを使用する際は、消毒液が充分乾いてから使用すること。