

医04 整形用品

一般医療機器 開腹術用スポンジ 15085000

縫製ガーゼ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

オオサキメディカル株式会社

お問い合わせ先 Tel 0120-15-0039

【形状・構造及び原理等】

- ・医療ガーゼを積層して縫製した製品です。
- ・ガーゼの材質:綿100%
- ・縫製糸の材質:綿100%
- ・柄付きは綿100%の紐を付けた製品です。

【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収及び器官の擦過傷防止のため開腹術中に
身体内部で用いる器具をいう。

【使用方法等】

- ・適宜滅菌して使用すること。
- ・滅菌は、高圧蒸気滅菌、E.O.G.滅菌ができる。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ・体内へ留置しないこと。
- ・開封後は早めに使用すること。
- ・滅菌して使用する場合は、再滅菌しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管する
こと。