

医04 整形用品

一般医療機器 医療用不織布 34655000

スーパークロスガーゼ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 滅菌して使用する場合は、プラズマ滅菌は避けること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は住所等】

製造販売業者

オオサキメディカル株式会社

〒452-0812 愛知県名古屋市西区玉池町203番地

お問い合わせ先 Tel 052-501-2167

製造業者

オオサキメディカル株式会社

** 岩倉工場 〒482-0017 愛知県岩倉市北島町白山18番地

郡上工場 〒501-4203 岐阜県郡上市八幡町初納514番地

【形状・構造及び原理等】

綿100%のセルロース繊維から成る、不織布ガーゼ製品です。

【使用目的、効能又は効果】

創傷又は外科切開部を処置するために用いる不織布から成る被覆・保護材をいう。

【品目仕様等】

自社規格「旧医用不織布ガーゼ基準」に従う。

本品は滅菌品ではない。

【操作方法又は使用方法等】

適宜滅菌して使用すること。

【使用上の注意】

- 体内へ留置しないこと。
- 包装が開封、破損及び汚損している場合は使用しないこと。
- 開封後は早めに使用すること。
- 滅菌して使用する場合は、再滅菌しないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

直射日光及び火気をさけ、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

【保守・点検に係る事項】

再使用禁止

【包装】

4号	25cm×25cm 4ツ折	200枚入箱包装
6号	30cm×30cm 4ツ折	200枚入箱包装
7号	30cm×30cm 8ツ折	200枚入箱包装
特製	病院特製仕様	