

医04 整形用品

一般医療機器 単回使用汎用サージカルドレープ 35531000

オオサキドレープR

再使用禁止

【警告】

消毒用アルコール等の可燃性消毒薬を使用した場合は、必ず乾燥していることを確認してから使用すること。
[電気メス等を使用する際、気化した成分に引火することがあるため。]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
オオサキメディカル株式会社
お問い合わせ先 Tel 0120-15-0039

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

- ・撥水性の不織布製シートからなる手術用ドレープ製品です。
- ・穴あきタイプも有ります。

【使用目的又は効果】

手術室やカテーテル処置室の汚染(器具やテーブルの上)から外科切開部位や術野を隔離するために、保護的なカバー又は障壁として用いる不織布製の用具をいう。本品は患者を手術中の熱、炎又は他の形態のエネルギーから保護するためにも使用する。本品は単回使用である。

【使用方法等】

- ・適宜滅菌して使用すること。
- ・滅菌は、高圧蒸気滅菌、E.O.G.滅菌ができる。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ・内視鏡や開創器などで光源を使用する場合は、光源の先端部をドレープの上に直接置かないこと。また、電気メスやレーザーの先端部をドレープの上に直接置かないこと。
[熱によりドレープが焦げて患者の身体に熱傷が発生することがあるため。]
- ・本品の使用により、かぶれなどの皮膚障害が生じた場合、アレルギー症状を起こした場合には、ただちに本品の使用を中止し、適切な処置をすること。
- ・外科開口部や創傷部位に接触させないこと。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光及び火気をさけ、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。