

一般医療機器 単回使用クラスI処置キット 33961001

滅菌オオサキ処置キットI-S

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

- ・一般的な処置(消毒、止血、清拭等)を行うために必要な各種の一般医療機器と衛生用品等を組合わせた滅菌キットです。
- ・本キットは、下表『構成品の種類、名称、規格等』に示す構成品のうち、2品目以上を組合わけています。

表)構成品の種類、名称、規格等

種 類	構成品名称・規格等
ガーゼ類	ガーゼ、X線造影糸入ガーゼ、不織布ガーゼ、救急絆創膏、サージカルパッド(サイズ各種)
脱脂綿類	カットメン、綿球、綿棒、圧迫綿(サイズ各種)
セッシ等	プラスチック製(サイズ各種)
ドレープ	吸水防水タイプ、撥水タイプ(サイズ各種)
外皮用殺菌消毒剤	ポビドンヨード製剤
シーツ・マット類	不織布製(サイズ各種)
テ ー プ	不織布製、プラスチック製(サイズ各種)
手 袋	ディスポーザブルタイプ(サイズ各種)
そ の 他	カップ、処理袋等

(注) 構成品にポビドンヨード製剤が含まれる場合、同封の添付文書を読むこと。

※組合わせにより、同梱されない製品があります。

【使用目的又は効果】

一般的な処置を行うために必要なクラスIの各種器具、被覆保護材及び医薬品の全てを含む、プレパッケージされたキットをいう。本品は単回使用である。

【使用方法等】

- ・滅菌容器から取り出し、不潔にならないように注意しながら使用すること。
- ・各構成品は、その使用用途から逸脱しない範囲で使用すること。

【使用上の注意】

1. 使用注意(次の患者には慎重に適用すること。)

- 1) 構成品に救急絆創膏やテープが含まれる場合
 - ・本品の使用により発疹・発赤・かゆみ等の症状があらわれた場合には使用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること。
 - ・パッド部分が濡れ、又は汚れたときは、直ちに患部を清潔にしてはり替えること。
- 2) 構成品にプラスチック製手袋が含まれる場合
 - ・かゆみ、かぶれ、発疹等を起こした場合には、使用を中止すること。
- 3) 構成品にセッシ等が含まれる場合
 - ・創傷面に直接接触させないこと。
 - ・無理に折り曲げたり、開いたりしないこと。
 - ・高温の物は挟まないこと。
 - ・重い物や滑りやすい物には使用しないこと。

2. 重要な基本的注意

- ・本品の使用により発疹・発赤・かゆみ等の症状があらわれた場合には使用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること。
- ・ガーゼ類が濡れ、又は汚れたときは、適切に交換すること。
- ・体内へ留置しないこと。
- ・開封後は速やかに使用すること。
- ・使用後は感染防止に配慮して安全な方法で廃棄すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
直射日光及び火気をさけ、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。
2. 有効期間
容器又は被包の「使用期限」に表示【自己認証(当社データ)による】。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

オオサキメディカル株式会社

お問い合わせ先 Tel 0120-15-0039