

医04 整形用品

一般医療機器 救急絆創膏 34864000

## 滅菌オオサキ防水パッド CN

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・再滅菌禁止

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

オオサキメディカル株式会社

お問い合わせ先 Tel 0120-15-0039

#### 【形状・構造及び原理等】

エチレンオキシドガス滅菌品(無菌性保証水準 SAL:10<sup>-6</sup>)

##### 1. 材質

- ・グリップフィルム:ポリオレフィン
- ・粘着テープ(キャリアフィルム):ポリエチレン
- ・粘着テープ(基材):ポリウレタンフィルム
- ・粘着テープ(粘着剤):アクリル系粘着剤
- ・パッド:有孔ポリエステルフィルム付不織布
- ・剥離紙:上質紙/ポリエチレン/シリコーン

##### 2. 原理

- ・パッドとそれを固定する用途の防水性粘着テープからなる。
- ・創傷面にパッドを当て、粘着テープで固定することにより、創傷面の被覆・保護を行う。

#### 【使用目的又は効果】

創傷面の被覆・保護。

#### 【使用方法等】

適宜使用すること。

#### 【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ・本品の使用により発疹・発赤・かゆみ等の症状が現れた場合には使用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること。
- ・粘着面を患部に貼らないこと。
- ・皮膚刺激の発生原因となるため、長時間貼付したり、急激に剥がしたりしないこと。
- ・パッド部分が濡れたり汚れた場合は、直ちに患部を清潔にして貼り替えること。
- ・開封後は速やかに使用すること。

#### 【保管方法及び有効期間等】

##### 1. 保管方法

- ・直射日光及び火気をさけ、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。
- ・小児の手の届かないところに保管すること。

##### 2. 有効期間

容器又は被包の「使用期限」に表示【自己認証(当社データ)による】。